

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 20 年 5 月 15 日

販売名 サビ・スマニアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 3.1 Ver. 3.1 Ver. 1.0	製造番号: 301152 作業年月日: 20 年 5 月 15 日 納入年月日: 17 年 6 月 28 日
顧客名 所在地	栗田医院 御中 兵庫県淡路市志筑新島 6-34		ご担当: 院長先生 様 電話番号: 0799-62-5000
作業区分 出張・引取	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 回目 修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐		作業時間 1.5 Hr 定期点検シール記入 ☒ 修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検

不具合原因、作業内容

定期保守部品交換

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 327
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレイ	正常	☐ ※左上に亀裂有り	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数	20.5.15 / 1回	
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0207 / T03 C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

完了

装置 情報	交換後運転回数: 665 回 リークチェック: 1079 回	更新 (リセット) 実施・未実施 自己洗浄: 411 回	消毒: 485 回 アルコール単独: 0 回	消毒+アル: 1401 回 エア単独: 0 回
----------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------	----------------------------

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個
交換後 No. 2010848	
オゾンセンサー	☒ 1個
交換後 No. 20821-015	
給水フィルター	☐ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1個
接続コネクタ: 水槽側	☐ 1個
接続コネクタ: チューブ側	☐ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個
排水フィルター	☐ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☒ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☒ 1個
マニホールド周辺チューブ	☒ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

R2 年 5 月 16 日

栗田 所 司

ご署名



修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

栗田 所 司