

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2020年 7月 22日

|                               |                                                                                                  |                                               |       |                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------|
| 販売名<br>サービスマニュアル<br>Ver (版番号) | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/>                                          | Ver. 3.1                                      | 製造番号  | : 100505       |
|                               | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>                                                    | Ver. 3.1                                      | 作業年月日 | : 2020年 7月 22日 |
|                               | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input type="checkbox"/>                                             | Ver. 1.0                                      | 納入年月日 | : 2012年 9月 26日 |
| 顧客名                           | 千里丘協立診療所 御中                                                                                      |                                               | ご担当   | : 院長先生 様       |
| 所在地                           | 大阪府摂津市千里丘東2丁目12-10                                                                               |                                               | 電話番号  | : 072-622-8638 |
| 作業区分                          | 有償 <input checked="" type="checkbox"/> 無償 <input type="checkbox"/> 保証期間 <input type="checkbox"/> | 作業時間 1.5 Hr                                   |       |                |
|                               | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 8回目                       | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |       |                |
| 出張・引取                         | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>           | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |       |                |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |    |                                     |              |                  |                                                 |
|----------|----|-------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 669    |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.68 ppm |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 前回交換日/交換回数   | 2017/8/30 / 535回 |                                                 |
| 殺菌槽 LED  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 運転プログラムバージョン | 正常               | <input type="checkbox"/> Ver. 0107 / T01A       |

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

|          |               |                          |              |              |
|----------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 44 回 | 更新 (リセット) <u>実施</u> ・未実施 | 消毒: 86 回     | 消毒+アル: 640 回 |
|          | リークチェック: 1 回  | 自己洗浄: 3 回                | アルコール単独: 0 回 | エア単独: 0 回    |

| 交換部品名称                                         | 交換・数量 | 交換部品名称                                               | 交換・数量 | 交換部品名称                                                | 交換・数量 |
|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|
| オゾン水濃度計 <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |       | オゾン分解触媒 <input checked="" type="checkbox"/> 1個       |       | 排水栓 <input checked="" type="checkbox"/> 1個            |       |
| 交換後 No. 17022656                               |       | 接続コネクタ; 水槽側 <input checked="" type="checkbox"/> 1個   |       | エアフィルター <input type="checkbox"/> 1個                   |       |
| オゾンセンサー <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |       | 接続コネクタ; チューブ側 <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |       | 水フィルター <input type="checkbox"/> 1個                    |       |
| 交換後 No. 191023-005                             |       | オゾン水濃度計用フィルタ <input type="checkbox"/> 1個             |       | 吸盤 <input checked="" type="checkbox"/> 1個             |       |
| 給水フィルター <input type="checkbox"/> 1本            |       | 排水フィルター <input type="checkbox"/> 1個                  |       | マニホールド周辺チューブ <input checked="" type="checkbox"/> 1セット |       |
| (中空糸・活性炭・糸巻)                                   |       | (従来型・新型)                                             |       | <input type="checkbox"/>                              |       |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 7 月 22 日

ご署名

龍川 通代

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

和田