

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2020年 7月 17日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100655	
作業年月日	2020年 7月 17日		作業時間	: Hr	
顧客名	池田内科クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	京都府向日市上植野町落堀14-5		電話番号	: 075-932-2239	
【継承開業】	2020年 4月		ご担当	様	
納入年月日	2013年 5月 28日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	/ 回目 (3回目)	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
アルコールキャブ(青) 交換			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハル数 702
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2018/5/18 / 526回
殺菌槽 LED	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0107 / TOL-A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
水圧低い。			

装置 情報	交換後運転回数: 162 回	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 12 回	殺菌+アル: 676 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 666 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO. 51905197
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, → NO. 160129-017
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄		年	月	日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。				
ご署名				

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	由井