

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2020年 9月 17日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/>	Ver. 3.1	製造番号	: 301216	
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>	Ver. 3.1	作業年月日	: 2020年 9月 17日	
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input type="checkbox"/>	Ver. 1.0	納入年月日	: 2017年 9月 4日	
顧客名	牧之段内科 御中			ご担当	: 院長先生 様
所在地	奈良県生駒市谷田町850-4 谷田ビル2階			電話番号	: 0743-74-0330
作業区分	有償 <input checked="" type="checkbox"/>	無償 <input type="checkbox"/>	保証期間 <input type="checkbox"/>	作業時間 / Hr	
	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/>	総合点検 <input type="checkbox"/>	3回目	定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>	
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/>	点検のみ <input type="checkbox"/>	その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 474
アルコールライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
オゾンセンサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.67 ppm
水位センサー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水漏れ確認	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	電源コード	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
トレー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	マニホールド周辺チューブ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	前回交換日/交換回数	
殺菌槽 LED	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	運転プログラムバージョン	正常 <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 0207/TO3C
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項 待機時主電源ONエラー。			

装置	交換後運転回数: 165 回	更新 (リセット) (実施)・未実施	消毒: 36 回	消毒+7L: 648 回
情報	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 648 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 <input checked="" type="checkbox"/>	1個
交換後 No. 15112188	
オゾンセンサー <input checked="" type="checkbox"/>	1個
交換後 No. 180528-014	
給水フィルター <input type="checkbox"/>	1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒 <input checked="" type="checkbox"/>	1個
接続コネクタ; 水槽側 <input type="checkbox"/>	1個
接続コネクタ; チューブ側 <input type="checkbox"/>	1個
オゾン水濃度計用フィルタ <input checked="" type="checkbox"/>	1個
排水フィルター <input type="checkbox"/>	1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓 <input checked="" type="checkbox"/>	1個
エアフィルター <input type="checkbox"/>	1個
水フィルター <input type="checkbox"/>	1個
吸盤 <input checked="" type="checkbox"/>	1個
マニホールド周辺チューブ <input type="checkbox"/>	1セット

お客様ご確認署名欄

2020年 9月 17日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

署名 牧之段 潔 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	奥田