

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2020年 9月 9日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 300980
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日 : 2020年 9月 9日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2016年 9月 16日
顧客名	あびこ内科外科大橋クリニック 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市住吉区苅田7-6-28		電話番号 : 06-6655-1122
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐	作業時間 1.5 Hr	
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

オゾン濃度低下, オゾン水生成異常有り.

不具合原因、作業内容

保守メンテナンス実施, オゾン水生成異常(パルス数 232)

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ パルス数 444
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.64 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐ 交換
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	/
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0207/T03C

作業結果 (完了) 暫定処理など、連絡事項、特記事項

正常運転確認.

装置 情報	交換後運転回数: 1392 回	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒: 290 回	消毒+アル: 1102 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 1 回	アルコール単独: 9 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個	オゾン分解触媒	☒ 1個	排水栓	☒ 1個
交換後 No. 14031727		接続コネクタ; 水槽側	☒ 1個	エアフィルター	☐ 1個
オゾンセンサー	☒ 1個	接続コネクタ; チューブ側	☒ 1個	水フィルター	☐ 1個
交換後 No. 141224-002		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個	吸盤	☒ 1個
給水フィルター	☐ 1本	排水フィルター	☐ 1個	マニホールド周辺チューブ	☒ 1セット
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)			☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL : 06-6228-3311

責任技術者

作業者

和田