

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2020年 10月 8日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒	Ver. 3.1	製造番号	: 100309
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	Ver. 3.1	作業年月日	: 2020年 10月 8日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2015年 2月 9日
顧客名	しらはま内科クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市港区八幡屋1-3-19		電話番号	: 06-6573-6322
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐	作業時間 2.0 Hr		
	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

タッチパネルが動かない (フリーズ)

不具合原因、作業内容

タッチパネル・コントロール基板交換.

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ パルス数 550
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.70 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2015/2/3 / 182回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☐ Ver. 0209/To5C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

タッチパネル SN: 124824C 057302 に交換 (交換前 SN: 124824C 052594)
コントロール基板交換. 作動確認良好

装置 情報	交換後運転回数: 184 回	更新 (リセット) 実施: ☒ 未実施: ☐	消毒: 20 回	消毒+アル: 965 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 158 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☐ 1個
交換後 No.	
オゾンセンサー	☐ 1個
交換後 No.	
給水フィルター	☐ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☐ 1個
接続コネクタ: 水槽側	☐ 1個
接続コネクタ: チューブ側	☐ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☐ 1個
排水フィルター	☐ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☐ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☐ 1個
マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 10 月 8 日

ご署名 白浜 健太郎



修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

和田