

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2020年 10月 9日

|                               |                                                                                                                          |          |                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 販売名<br>サービスマニュアル<br>Ver (版番号) | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                  | Ver. 3.1 | 製造番号 : 100797        |
|                               | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>                                                                            | Ver. 3.1 | 作業年月日 : 2020年 10月 9日 |
|                               | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input type="checkbox"/>                                                                     | Ver. 1.0 | 納入年月日 : 2013年 8月 19日 |
| 顧客名                           | かしまクリニック 御中                                                                                                              |          | ご担当 : 院長先生 様         |
| 所在地                           | 大阪府茨木市丑寅2丁目1番6号天王医療ビル2階                                                                                                  |          | 電話番号 : 072-622-3355  |
| 作業区分                          | 有償 <input checked="" type="checkbox"/> 無償 <input type="checkbox"/> 保証期間 <input type="checkbox"/> 作業時間 / Hr               |          |                      |
|                               | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 3回目 定期点検シート記入 <input checked="" type="checkbox"/> |          |                      |
| 出張・引取                         | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>   |          |                      |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

9/2 E:210, E:212, E:108  
10/8 E:210 x 5日

不具合原因、作業内容

定期交換部品交換で対応。

| 点検項目     |    |                                     |              |                  |                                                      |
|----------|----|-------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/> バルス数 500         |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.71 ppm      |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| トレー      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 前回交換日/交換回数   | 2019/8/21 / 261回 |                                                      |
| 殺菌槽 LED  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 運転プログラムバージョン | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 0107 / 1020 |

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

|          |                |                      |              |              |
|----------|----------------|----------------------|--------------|--------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 167 回 | 更新 (リセット) (実施) ・ 未実施 | 消毒: 5 回      | 消毒+アル: 268 回 |
|          | リークチェック: 0 回   | 自己洗浄: 3 回            | アルコール単独: 0 回 | エア単独: 1 回    |

| 交換部品名称             | 交換・数量                                  |
|--------------------|----------------------------------------|
| オゾン水濃度計            | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| 交換後 No. 13071469   |                                        |
| オゾンセンサー            | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| 交換後 No. 180611-002 |                                        |
| 給水フィルター            | <input type="checkbox"/> 1本            |
| (中空糸・活性炭・糸巻)       |                                        |

| 交換部品名称        | 交換・数量                                  |
|---------------|----------------------------------------|
| オゾン分解触媒       | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| 接続コネクタ: 水槽側   | <input type="checkbox"/> 1個            |
| 接続コネクタ: チューブ側 | <input type="checkbox"/> 1個            |
| オゾン水濃度計用フィルタ  | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| 排水フィルター       | <input type="checkbox"/> 1個            |
| (従来型・新型)      |                                        |

| 交換部品名称       | 交換・数量                                  |
|--------------|----------------------------------------|
| 排水栓          | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| エアフィルター      | <input type="checkbox"/> 1個            |
| 水フィルター       | <input type="checkbox"/> 1個            |
| 吸盤           | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| マニホールド周辺チューブ | <input type="checkbox"/> 1セット          |
|              | <input type="checkbox"/>               |

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 10月 9日

ご署名 奥田 健治 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

| 責任技術者 | 作業者 |
|-------|-----|
|       | 奥田  |