

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2020年 10月 9日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号	: 500019
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	Ver. 3.1	作業年月日	: 2020年 10月 9日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒	Ver. 1.0	納入年月日	: 2018年 10月 1日
顧客名	西川医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	京都府京都市左京区岩倉北池田町67-4		電話番号	: 075-705-3450
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 Hr
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

プログラム更新(コントロール基板・タッチパネル)

点検項目		結果	備考
フタロック	正常 ☒		
酸素ライン	正常 ☒	残 4MPa	
アルコールライン	正常 ☒		
オゾンセンサ	正常 ☒		
給水ライン	正常 ☒		
濃度計流量	正常 ☒		
水位センサー	正常 ☒		
水漏れ確認	正常 ☒		
清掃	正常 ☒		
トレー	正常 ☒		
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		
殺菌槽 LED	正常 ☒		
エアライン	正常 ☒		
オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バルブ数 990	
排水栓、排水ライン	正常 ☒		
細管送水ライン	正常 ☒		
排気ライン	正常 ☒		
オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.71 ppm	
異常音、振動	正常 ☒		
電源コード	正常 ☒		
殺菌チューブ類	正常 ☒		
マニホールド周辺チューブ	正常 ☒		
前回交換日/交換回数			
運転プログラムバージョン	正常 ☒	Ver. 0304 T12A	

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 173 回	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	消毒: 15 回	消毒+アル: 412 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 83 回	アルコール単独: 2 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個
交換後 No. 18123430	
オゾンセンサー	☒ 1個
交換後 No. 180601-005	
給水フィルター	☐ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1個
接続コネクタ: 水槽側	☐ 1個
接続コネクタ: チューブ側	☐ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個
排水フィルター	☐ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☒ 1個
エアフィルター	☒ 1個
水フィルター	☒ 1個
吸盤	☒ 1個
マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 10 月 9 日

ご署名 桶谷 育子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	由井