

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020年 10月 27日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/>	Ver. 3.1	製造番号 : 300914
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>	Ver. 3.1	作業年月日 : 2020年 10月 27日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input type="checkbox"/>	Ver. 1.0	納入年月日 : 2016年 7月 1日
顧客名	くまとり坂口クリニック 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	大阪府泉南郡熊取町野田3-353-4 ハーベスト野田1階		電話番号 : 072-493-8855
作業区分	有償 <input checked="" type="checkbox"/> 無償 <input type="checkbox"/> 保証期間 <input type="checkbox"/>	作業時間 1.5 Hr	
	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 4回目	定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>	
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目		結果	備考
フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
酸素ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	残り12.0mpa
アルコールライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
オゾンセンサ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
給水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
濃度計流量	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
水位センサー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
水漏れ確認	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
清掃	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
トレー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
殺菌槽コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
殺菌槽 LED	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
エアライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
オゾン水濃度計動作	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	バルブ数 560
排水栓、排水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
細管送水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
排気ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
オゾン濃度	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	履歴 0.69 ppm
異常音、振動	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
電源コード	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
殺菌チューブ類	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
マニホールド周辺チューブ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換
前回交換日/交換回数			
運転プログラムバージョン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver. 0207 / T02C

作業結果 (完了/ 暫定処理など)、連絡事項、特記事項  
保守メンテナンス実施完了

装置情報	交換後運転回数: 164 回	更新(リセット)実施・未実施	消毒: 1227 回	消毒+アル: 708 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 277 回	アルコール単独: 38 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	<input checked="" type="checkbox"/> 1個
交換後 No. 51909281	
オゾンセンサー	<input checked="" type="checkbox"/> 1個
交換後 No. 170906-002	
給水フィルター	<input type="checkbox"/> 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	<input checked="" type="checkbox"/> 1個
接続コネクタ: 水槽側	<input checked="" type="checkbox"/> 1個
接続コネクタ: チューブ側	<input checked="" type="checkbox"/> 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	<input checked="" type="checkbox"/> 1個
排水フィルター	<input type="checkbox"/> 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	<input checked="" type="checkbox"/> 1個
エアフィルター	<input type="checkbox"/> 1個
水フィルター	<input type="checkbox"/> 1個
吸盤	<input checked="" type="checkbox"/> 1個
マニホールド周辺チューブ	<input checked="" type="checkbox"/> 1セット
	<input type="checkbox"/>

お客様ご確認署名欄  
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。  
 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020年 10月 27日  
 ご署名 和田 啓彦 印

修理業者	新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1 TEL: 06-6228-3311	責任技術者	和田
		作業者	