

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/>	Ver. 3.1	製造番号 : 100230
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>	Ver. 3.1	作業年月日 : 2020年10月27日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input type="checkbox"/>	Ver. 1.0	納入年月日 : 2011年9月29日
顧客名	衣笠医院 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	京都府京都市右京区龍安寺齋宮町5		電話番号 : 075-462-8473
作業区分	有償 <input checked="" type="checkbox"/> 無償 <input type="checkbox"/>	保証期間 <input type="checkbox"/>	作業時間 Hr
	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/>	9回目	定期点検シート記入 <input checked="" type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/>	その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 600
アルコールライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
オゾンセンサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm
水位センサー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水漏れ確認	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	電源コード	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
トレー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	マニホールド周辺チューブ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	前回交換日/交換回数	2016/10/4 / 116回
殺菌槽 LED	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	運転プログラムバージョン	正常 <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 0107 / T01-A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 8 回	更新 (リセット) <u>実施</u> ・未実施	消毒: 9 回	消毒+アル: 169 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 3 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 <input checked="" type="checkbox"/> 1個	
交換後 No. 18103338	
オゾンセンサー <input checked="" type="checkbox"/> 1個	
交換後 No. 171011-004	
給水フィルター <input type="checkbox"/> 1本	
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒 <input checked="" type="checkbox"/> 1個	
接続コネクタ; 水槽側 <input type="checkbox"/> 1個	
接続コネクタ; チューブ側 <input type="checkbox"/> 1個	
オゾン水濃度計用フィルタ <input checked="" type="checkbox"/> 1個	
排水フィルター <input type="checkbox"/> 1個	
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓 <input checked="" type="checkbox"/> 1個	
エアフィルター <input type="checkbox"/> 1個	
水フィルター <input type="checkbox"/> 1個	
吸盤 <input checked="" type="checkbox"/> 1個	
マニホールド周辺チューブ <input type="checkbox"/> 1セット	
<input type="checkbox"/>	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020年10月27日

ご署名 福川由佳理 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	由井