

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2020年 11月 5日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	製造番号 : 301335 作業年月日 : 2020年 11月 5日 納入年月日 : 2019年 1月 9日
顧客名	伊奈胃腸科 御中	ご担当 : 院長先生 様
所在地	和歌山県和歌山市本町2丁目42番	電話番号 : 073-428-1717
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5回目 出張・引取 修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	作業時間 1.5 Hr 定期点検シール記入 ☒ 修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 423
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2020/3/5 / 6642回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0207 / T04C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

No. 301334①右 : 1676回
No. 301336②中 : 1656回
②の77が閉まらなくなった

装置	交換後運転回数 : 1822 回	更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	消毒 : 7395 回	消毒+アル : 1069 回
情報	リークチェック : 1605 回	自己洗浄 : 814 回	アルコール単独 : 199 回	エア単独 : 331 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個 交換後 No. 11020580	
オゾンセンサー ☒ 1個 交換後 No. 130717-029	
給水フィルター ☐ 1本 (中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒 ☒ 1個	
接続コネクタ; 水槽側 ☐ 1個	
接続コネクタ; チューブ側 ☐ 1個	
オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個	
排水フィルター ☐ 1個 (従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓 ☒ 1個	
エアフィルター ☐ 1個	
水フィルター ☐ 1個	
吸盤 ☒ 1個	
マニホールド周辺チューブ ☒ 1セット	
☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

令和 2 年 11 月 5 日
和歌山県和歌山市本町2丁目42番地

ご署名

医療法人 和歌山県和歌山市本町2丁目42番地

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL : 06-6228-3311

責任技術者

作業者

奥田