

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20201020
発行日: 2020 年 10 月 20 日

販売名 / サービスマシナ Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号 500470
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業年月日 2020 年 10 月 20 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	作業時間 Hr
顧客名	すずき内科クリニック 様	TEL: 0799-43-3188
所在地	兵庫県南あわじ市市福永416-4	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2020 年 5 月 14 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☒	修理表示貼付 ☐

依頼内容	
10/15 9:12 オゾンリーク異常 (E204) ... その後 10/16 19 には正常終了	
作業内容	
・ オゾンセンサ、オゾン分解触媒、排水ホース、設置環境で確認しました。 ・ 運転データで記録する部品を取り付けました。	
点検項目	
フタロック 正常 ☐	水槽 LED 正常 ☐
酸素ライン 正常 ☒ ポンパ 45MPa	エアライン 正常 ☐
アルコールライン 正常 ☐	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 928
オゾンセンサ 正常 ☒ 交換 (調査のため)	排水栓、排水ライン 正常 ☐
給水ライン 正常 ☐	細管送水ライン 正常 ☐
濃度計流量 正常 ☐	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☐	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☐
清掃 正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☐
トレイ 正常 ☐	殺菌/消毒 チューブ類 正常 ☐
水槽側コネクタ 正常 ☐	マニホールド周辺チューブ 正常 ☐
	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0304 / T12A
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
異常ありませんでした。	

装置情報	交換後運転回数: 44	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 45 / 42	殺菌/消毒+7M: 0 / 0
	リークチェック: 44	自己洗浄: 43	7M-1単独: 0	エア単独: 44

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☐	吸盤	☐
交換後 No. 161011~001			排水栓	☐	トランス	☐
オゾンセンサー	☐		接続コネクタ; 水槽側	☐	電源コード	☐
			接続コネクタ; チューブ側	☐	コントロール基板	☐
			オゾン水濃度計用フィルタ	☐		☐

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シバウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者 作業者

中澤 中澤