

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2020年 11月 13日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号	: 301033
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日	: 2020年 11月 13日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2016年 11月 21日
顧客名	わたなべ診療所 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市住吉区帝塚山西1丁目12番20号		電話番号	: 06-6672-4116
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 / Hr
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	4回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

定期保守メンテナンス

点検項目		結果	備考
フタロック	正常 ☒		
酸素ライン	正常 ☒		
アルコールライン	正常 ☒		
オゾンセンサ	正常 ☒		
給水ライン	正常 ☒		
濃度計流量	正常 ☒		
水位センサー	正常 ☒		
水漏れ確認	正常 ☒		
清掃	正常 ☒		
トレイ	正常 ☒		
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		
殺菌槽 LED	正常 ☒		
エアライン	正常 ☒		
オゾン水濃度計動作	正常 ☒		バルブ数 815
排水栓、排水ライン	正常 ☒		
細管送水ライン	正常 ☒		
排気ライン	正常 ☒		
オゾン濃度	正常 ☒		履歴 0.70 ppm
異常音、振動	正常 ☒		
電源コード	正常 ☒		
殺菌チューブ類	正常 ☒		
マニホールド周辺チューブ	正常 ☒		
前回交換日/交換回数			
運転プログラムバージョン	正常 ☒		Ver. 0207 / T03C

作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項

定期保守メンテナンス実施、正常動作確認

装置 情報	交換後運転回数: 114 回	更新 (リセット) 実施 / 未実施	消毒: 39 回	消毒+アル: 347 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 1 回	アルコール単独: 2 回	エア単独: 1 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個		オゾン分解触媒 ☒ 1個		排水栓 ☒ 1個	
交換後 No. 51808003		接続コネクタ: 水槽側 ☒ 1個		エアフィルター ☐ 1個	
オゾンセンサー ☒ 1個		接続コネクタ: チューブ側 ☒ 1個		水フィルター ☐ 1個	
交換後 No. 141016-003		オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個		吸盤 ☒ 1個	
給水フィルター ☐ 1本		排水フィルター ☐ 1個		マニホールド周辺チューブ ☐ 1セット	
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)			

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020年 11月 13日

ご署名 渡部 幸一郎

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作者
	和田