

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2020年 12月 3日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号	: 301336	
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日	: 2020年 12月 3日	
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2018年 1月 9日	
顧客名	伊奈胃腸科 御中			ご担当	: 院長先生 様
所在地	和歌山県和歌山市本町2丁目42番			電話番号	: 073-428-1717
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 1.5 Hr	
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	5回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

オゾンリーク異常 E:204 (5/20・5/22・11/6・11/30)

不具合原因、作業内容

塩ビ配管の関係(①と分岐共有)

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 397
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2020/4/2 / 6,999回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0207/104C

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

オーバーホールについてのご案内

装置	交換後運転回数: 1907 回	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	消毒: 7677 回	消毒+7L: 1229 回
情報	リークチェック: 2245 回	自己洗浄: 838 回	7L単独: 541 回	エア単独: 472 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個		オゾン分解触媒 ☒ 1個		排水栓 ☒ 1個	
交換後 No. 11060668		接続コネクタ: 水槽側 ☐ 1個		エアフィルター ☐ 1個	
オゾンセンサー ☒ 1個		接続コネクタ: チューブ側 ☐ 1個		水フィルター ☐ 1個	
交換後 No. 180627-007		オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個		吸盤 ☒ 1個	
給水フィルター ☐ 1本		排水フィルター ☐ 1個		マニホールド周辺チューブ ☒ 1セット	
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)			

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

和歌山県和歌山市本町2丁目42番地

伊奈胃腸科 院長先生 様

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	奥田