

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 20 年 7 月 10 日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 300 665
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日 : 20 年 7 月 10 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 15 年 11 月 2 日
顧客名	ヤマケイ消化器クリニック 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	兵庫県神戸市垂水区日南2丁目1-4垂水駅前ゴールドビル2F		電話番号 : 078-704-3536
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 作業時間 / Hr		
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検 (定期)

不具合原因、作業内容

保守部品交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 530
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☐	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☐ △ ※左上に亀裂有り	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2018/7/26 / 5063回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0207/T02C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

完了

装置情報	交換後運転回数: 1968回	更新 (リセット) 実施・未実施 ☒	消毒: 3829 回	消毒+アル: 4949 回
	リークチェック: 6527 回	自己洗浄: 1291 回	アルコール単独: 89 回	エア単独: 3 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個
交換後 No. 15102160	
オゾンセンサー	☒ 1個
交換後 No. 170314-002	
給水フィルター	☐ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1個
接続コネクタ; 水槽側	☐ 1個
接続コネクタ; チューブ側	☐ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個
排水フィルター	☐ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☒ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☒ 1個
マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 7 月 10 日

ご署名 楠田 亜矢子 印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

山田