

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 20 年 7 月 31 日

|                               |                                                                                        |                               |                                               |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名<br>サービスマニュアル<br>Ver (版番号) | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/>                                           | Ver. 3.1                      | 製造番号 : 300030                                 |
|                               | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                               | Ver. 3.1                      | 作業年月日 : 20年7月31日                              |
|                               | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input type="checkbox"/>                                   | Ver. 1.0                      | 納入年月日 : 13年7月8日                               |
| 顧客名                           | 山縣 クリニック 御中                                                                            |                               | ご担当 : 院長先生 様                                  |
| 所在地                           | 兵庫県丹波市市島町上竹田 1099-1                                                                    |                               | 電話番号 : 0795-80-3675                           |
| 作業区分                          | 有償 <input checked="" type="checkbox"/> 無償 <input type="checkbox"/>                     | 保証期間 <input type="checkbox"/> | 作業時間 / Hr                                     |
|                               | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 7 回目                       |                               | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取                         | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> |                               | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検  
消毒終了後に、槽内に水が残っている時がある。

不具合原因、作業内容

保守部品交換

| 点検項目     |                                        |              |                                                         |
|----------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 540         |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm      |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 前回交換日/交換回数   | 2018/7/18 / 4190回                                       |
| 殺菌槽 LED  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 運転プログラムバージョン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 0204 / To4C |

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

定期保守点検 → 完了  
\*消毒後に槽内に水が残る原因は給水電磁弁の消耗と思われるため、出来れば部品交換をお勧め致します。

|      |                 |                  |            |               |
|------|-----------------|------------------|------------|---------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 684 回  | 更新 (リセット) 実施・未実施 | 消毒: 187 回  | 消毒+アル: 5378 回 |
|      | リークチェック: 5207 回 | 自己洗浄: 1990 回     | アルコール単独: 回 | エア単独: 回       |

| 交換部品名称             | 交換・数量                                  | 交換部品名称        | 交換・数量                                  | 交換部品名称       | 交換・数量                                  |
|--------------------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| オゾン水濃度計            | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 | オゾン分解触媒       | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 | 排水栓          | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| 交換後 No. 15052032   |                                        | 接続コネクタ: 水槽側   | <input type="checkbox"/> 1個            | エアフィルター      | <input type="checkbox"/> 1個            |
| オゾンセンサー            | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 | 接続コネクタ: チューブ側 | <input type="checkbox"/> 1個            | 水フィルター       | <input type="checkbox"/> 1個            |
| 交換後 No. 180521-012 |                                        | オゾン水濃度計用フィルタ  | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 | 吸盤           | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| 給水フィルター            | <input type="checkbox"/> 1本            | 排水フィルター       | <input type="checkbox"/> 1個            | マニホールド周辺チューブ | <input type="checkbox"/> 1セット          |
| (中空糸・活性炭・糸巻)       |                                        | (従来型・新型)      |                                        |              | <input type="checkbox"/>               |

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。  
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 7 月 31 日

ご署名 山縣 貴一

|      |                                                         |       |           |
|------|---------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 修理業者 | 新鋭工業 株式会社 大阪支店<br>大阪府大阪市中央区今橋1-6-1<br>TEL: 06-6228-3311 | 責任技術者 | 作業者<br>山田 |
|------|---------------------------------------------------------|-------|-----------|