

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020年8月20日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号: 300935
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日: 2020年8月20日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日: 16年8月8日
顧客名	加古川石炭病院 御中		ご担当: 院長先生 様
所在地	兵庫県加古川市八幡町下村1353番地		電話番号: 079-438-8333
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 作業時間 / Hr		
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4 回目	定期点検シート記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検

不具合原因、作業内容

保守部品交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水温度計動作	正常 ☒ バルブ数 584
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒ ※主上に多量の菌糸有り	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2018.8.9 / 1666回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver.0207 / T02C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

※トレーに多量の菌糸有り（今の所、ご使用出来すが菌糸が酷い場合、交換が必要）

装置	交換後運転回数: 939 回	更新（リセット）実施・未実施	消毒: 1769 回	消毒+7L: 836 回
情報	リークチェック: 回	自己洗浄: 623 回	7Lアルコール単独: 9 回	エア単独: 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水温度計 ☒ 1個	
交換後 No. 12020920	
オゾンセンサー ☒ 1個	
交換後 No. 181012-00141	
給水フィルター ☐ 1本	
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒 ☒ 1個	
接続コネクタ: 水槽側 ☒ 1個	
接続コネクタ: チューブ側 ☒ 1個	
オゾン水温度計用フィルタ ☒ 1個	
排水フィルター ☐ 1個	
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓 ☒ 1個	
エアフィルター ☐ 1個	
水フィルター ☐ 1個	
吸盤 ☒ 1個	
マニホールド周辺チューブ ☐ 1セット	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 8月 20日

ご署名

井上 興也

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

山田