

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2021年 3月 24日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒	Ver. 3.1	製造番号	: 100148
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	Ver. 3.1	作業年月日	: 2021年 3月 24日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2011年 3月 10日
顧客名	前田内科クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府岸和田市土生町8-14-27		電話番号	: 072-428-0007
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 / Hr
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	10回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 328
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒ 0.72
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.90 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☐
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2017/3/1 / 1885回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0107-101A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

待機時主電源 ON になる。自パイル。
フジ純正アダプター使用。専用給排水。L=トゲ有。
EG-6400N。EP-6000イオンサ-

装置	交換後運転回数: 312 回	更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	消毒: 23 回	消毒+アル: 3202 回
情報	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 129 回	アルコール単独: 3 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個	
交換後 No. 12010864	
オゾンセンサー ☒ 1個	
交換後 No. 200218-001	
給水フィルター ☐ 1本	
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒 ☒ 1個	
接続コネクタ: 水槽側 ☒ 1個	
接続コネクタ: チューブ側 ☒ 1個	
オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個	
排水フィルター ☐ 1個	
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓 ☒ 1個	
エアフィルター ☐ 1個	
水フィルター ☐ 1個	
吸盤 ☒ 1個	
マニホールド周辺チューブ ☒ 1セット	
☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

奥田