

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2021年 3月 17日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/>	Ver. 3.1	製造番号	: 300257	
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>	Ver. 3.1	作業年月日	: 2021年 3月 17日	
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input type="checkbox"/>	Ver. 1.0	納入年月日	: 2014年 3月 31日	
顧客名	北住医院 御中			ご担当	: 院長先生 様
所在地	京都府京都市伏見区向島本丸町20ア-ス アーク観月橋 1階			電話番号	: 075-612-5217
作業区分	有償 <input checked="" type="checkbox"/>	無償 <input type="checkbox"/>	保証期間 <input type="checkbox"/>	作業時間	/ Hr
	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/>	総合点検 <input type="checkbox"/>	回目	定期点検シール記入	<input checked="" type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/>	点検のみ <input type="checkbox"/>	その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付	<input type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容
 アルコールの減りが悪いとの報告あり、サドノホリを開け確認し異常は見られなかった。
 注入量を+1に設定し様子を見てもらう。これでやはり納得いただいている。

点検項目		結果	備考
フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
酸素ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
アルコールライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
オゾンセンサ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
給水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
濃度計流量	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
水位センサー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
水漏れ確認	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
清掃	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
トレー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
殺菌槽コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
殺菌槽 LED	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
エアライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
オゾン水濃度計動作	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	バルブ数 441
排水栓、排水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
細管送水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
排気ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
オゾン濃度	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	履歴 0.71 ppm
異常音、振動	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
電源コード	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
殺菌チューブ類	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
マニホールド周辺チューブ	正常	<input type="checkbox"/>	
前回交換日/交換回数	2018/3/12 / 740回		
運転プログラムバージョン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver. 0207 / To4C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 95 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 55 回	消毒+アル: 157 回
	リークチェック: 1165 回	自己洗浄: 984 回	アルコール単独: 4 回	エア単独: 1 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	<input checked="" type="checkbox"/> 1個
交換後 No. 16062355	
オゾンセンサー	<input checked="" type="checkbox"/> 1個
交換後 No. 130510-024	
給水フィルター	<input type="checkbox"/> 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	<input checked="" type="checkbox"/> 1個
接続コネクタ: 水槽側	<input type="checkbox"/> 1個
接続コネクタ: チューブ側	<input type="checkbox"/> 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	<input checked="" type="checkbox"/> 1個
排水フィルター	<input type="checkbox"/> 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	<input checked="" type="checkbox"/> 1個
エアフィルター	<input type="checkbox"/> 1個
水フィルター	<input type="checkbox"/> 1個
吸盤	<input checked="" type="checkbox"/> 1個
マニホールド周辺チューブ	<input type="checkbox"/> 1セット
	<input type="checkbox"/>

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

3年 3月 17日

ご署名 北住清治 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中川