

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2021年 4月 6日

販売名 ／ サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号	: 300240
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日	: 2021年 4月 2日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2014年 3月 11日
顧客名	松井胃腸科クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市天王寺区生玉町2-3-301		電話番号	: 06-6770-2226
作業区分	有償 ☐	無償 ☒	保証期間 ☐	作業時間 2.0 Hr
	保守点検 ☐	総合点検 ☐	7回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
運転中にタッチパネル表示が消え電源が入らない。 本体より焦げた臭いがする。	
不具合原因、作業内容	
本体分解点検しましたところ、直流電源基盤が故障してコンデンサから電解液が流出しており安全装置が働いて電源がストップしたと思われます。 直流電源基盤とコントロール基盤（負荷影響可能性有り）を交換。 コントロール基板交換に伴いプログラム変更を実施（Ver. 0204/T04C⇒0209/T05C）	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 780
アルコールライン 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
オゾンセンサ 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水位センサー 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
水漏れ確認 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
清掃 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☐
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	前回交換日／交換回数 2021/3/15 / 7114回
殺菌槽 LED 正常 ☒	運転プログラムバージョン 変更 ☒ Ver. 0209 / T05C
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
上記部品交換し本体試運転、正常運転確認（オゾン濃度0.70ppm）	

装置 情報	交換後運転回数: 3 回	更新 (リセット) 実施: ☒	消毒: 2193 回	消毒+アル: 4924 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 212 回	アルコール単独: 2 回	エア単独: 2 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☐ 1個		オゾン分解触媒 ☐ 1個		排水栓 ☐ 1個	
交換後 No.		接続コネクタ; 水槽側 ☐ 1個		エアフィルター ☐ 1個	
オゾンセンサー ☐ 1個		接続コネクタ; チューブ側 ☐ 1個		水フィルター ☐ 1個	
交換後 No.		オゾン水濃度計用フィルタ ☐ 1個		吸盤 ☐ 1個	
給水フィルター ☐ 1本		排水フィルター ☐ 1個		マニホールド周辺チューブ ☐ 1セット	
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)			

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 4 月 8 日
ご署名 和田 成生 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	和田