

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2021年 4月 8日

販売名 サニ・スマニアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号	: 300308
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日	: 2021年 4月 8日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2014年 5月 30日
顧客名	奥医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府東大阪市柏田本町3-8		電話番号	: 06-6721-1324
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 1.0 Hr	
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐	7回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒		エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	ポンプ圧 12.0 mpa	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 596
アルコールライン	正常 ☒		排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒		細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒		排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒		オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水位センサー	正常 ☒		異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒		電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒		殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒		マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		前回交換日/交換回数	2019/4/24 / 977回
殺菌槽 LED	正常 ☒		運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0204 / 104c

作業結果 (点検、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

保守メンテナンス完了、正常運転確認。

装置情報	交換後運転回数: 652 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 751 回	消毒+アル: 878 回
	リークチェック: 2 回	自己洗浄: 86 回	アルコール単独: 3 回	エア単独: 100 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個
交換後 No. 13121641	
オゾンセンサー	☒ 1個
交換後 No. 190116-001M1	
給水フィルター	☐ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1個
接続コネクタ: 水槽側	☐ 1個
接続コネクタ: チューブ側	☐ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個
排水フィルター	☐ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☒ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☒ 1個
マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

R3 年 4 月 8 日

ご署名

浜田

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

和田