

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2021年 4月 14日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/>	Ver. 3.1	製造番号	: 300307
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>	Ver. 3.1	作業年月日	: 2021年 4月 14日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input type="checkbox"/>	Ver. 1.0	納入年月日	: 2014年 5月 23日
顧客名	おくクリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	和歌山県海南市名高243		電話番号	: 073-483-5421
作業区分	有償 <input checked="" type="checkbox"/>	無償 <input type="checkbox"/>	保証期間 <input type="checkbox"/>	作業時間 1.5 Hr
	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/>	総合点検 <input type="checkbox"/>	6回目	定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/>	点検のみ <input type="checkbox"/>	その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 698
アルコールライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
オゾンセンサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.72 ppm
水位センサー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水漏れ確認	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	電源コード	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
トレー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	マニホールド周辺チューブ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	前回交換日/交換回数	2019/4/10 / 3004回
殺菌槽 LED	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	運転プログラムバージョン	正常 <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 0204 / T04C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項 待機時、主電源ONユーザー。

GIF-1200N, GIF-H290, PCF-H290I, CV-290

装置情報	交換後運転回数: 2029 回	更新(リセット) 実施 ・未実施	消毒: 2228 回	消毒+7L: 2805 回
	リークチェック: 62 回	自己洗浄: 1719 回	アルコール単独: 81 回	エア単独: 6 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	<input checked="" type="checkbox"/> 1個
交換後 No. 1709 2842	
オゾンセンサー	<input checked="" type="checkbox"/> 1個
交換後 No. 180424-006	
給水フィルター	<input type="checkbox"/> 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	<input checked="" type="checkbox"/> 1個
接続コネクタ: 水槽側	<input checked="" type="checkbox"/> 1個
接続コネクタ: チューブ側	<input checked="" type="checkbox"/> 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	<input checked="" type="checkbox"/> 1個
排水フィルター	<input type="checkbox"/> 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	<input checked="" type="checkbox"/> 1個
エアフィルター	<input type="checkbox"/> 1個
水フィルター	<input type="checkbox"/> 1個
吸盤	<input checked="" type="checkbox"/> 1個
マニホールド周辺チューブ	<input checked="" type="checkbox"/> 1セット
	<input type="checkbox"/>

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

3年 4月 14日
 和歌山県海南市名高243
 (医)喜生会 おくクリニック

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	奥田