

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2021年 4月 26日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 300012
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日 : 2021年 4月 26日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2013年 4月 9日
顧客名	まつむら胃腸科クリニック 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	大阪府吹田市新芦屋上22-1-102		電話番号 : 06-6369-7077
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐	作業時間 1.0 Hr	
	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 3回目	定期点検シート記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

消毒終了後異音がある。→ 消毒槽下部より

不具合原因、作業内容

コントロール基盤不具合により 排水ポンプが作動
コントロール基盤交換, 排水フィルター撤去(フィルターのみ)

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 480
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレイ	正常	☒ ヒビあり	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数	/	
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0207 / T04c

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

正常運転確認。保守メンテナンス来年度実施予定。

装置 情報	交換後運転回数: 562 回	更新(リセット)実施: 未実施	消毒: 212 回	消毒+アル: 350 回
	リークチェック: 351 回	自己洗浄: 52 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 9 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☐ 1個	オゾン分解触媒	☐ 1個	排水栓	☐ 1個
交換後 No.		接続コネクタ; 水槽側	☐ 1個	エアフィルター	☐ 1個
オゾンセンサー	☐ 1個	接続コネクタ; チューブ側	☐ 1個	水フィルター	☐ 1個
交換後 No.		オゾン水濃度計用フィルタ	☐ 1個	吸盤	☐ 1個
給水フィルター	☐ 1本	排水フィルター	☐ 1個	マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)			

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 4 月 26 日

ご署名 松村 有美子



修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	和田