

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2021年 4月 28日

|                              |                                                                      |                               |                                               |                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| 販売名<br>サビ・スミ・アル<br>Ver (版番号) | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/>              | Ver. 3.1                      | 製造番号                                          | : 100791       |
|                              | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>                        | Ver. 3.1                      | 作業年月日                                         | : 2020年 4月 26日 |
|                              | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input type="checkbox"/>                 | Ver. 1.0                      | 納入年月日                                         | : 2013年 7月 3日  |
| 顧客名                          | たいしょう生協診療所 御中                                                        |                               | ご担当                                           | : 院長先生 様       |
| 所在地                          | 大阪府大阪市大正区千島1-20-12                                                   |                               | 電話番号                                          | : 06-6554-1197 |
| 作業区分                         | 有償 <input checked="" type="checkbox"/> 無償 <input type="checkbox"/>   | 保証期間 <input type="checkbox"/> | 作業時間 1.5 Hr                                   |                |
|                              | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/>          | 7回目                           | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                |
| 出張・引取                        | 修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> | その他 <input type="checkbox"/>  | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |                |

## 不具合状況、依頼内容、異常履歴

4/24 (土) 龍本様より Tel あり.

電源スイッチ 起ち上げ時タッチパネル表示がフリーズして作動しない.

## 不具合原因、作業内容

コントロール基盤 不具合によるフリーズ ⇒ 交換  
試運転実施.

## 点検項目

|          |    |                                     |              |                 |                                                        |
|----------|----|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常              | <input checked="" type="checkbox"/>                    |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常              | <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数               |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常              | <input checked="" type="checkbox"/>                    |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常              | <input checked="" type="checkbox"/>                    |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常              | <input checked="" type="checkbox"/>                    |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常              | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.7 / ppm       |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常              | <input checked="" type="checkbox"/>                    |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常              | <input checked="" type="checkbox"/>                    |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常              | <input checked="" type="checkbox"/>                    |
| トレイ      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常              | <input checked="" type="checkbox"/>                    |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 前回交換日 / 交換回数 | 2018/7/2 / 499回 |                                                        |
| 殺菌槽 LED  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 運転プログラムバージョン | 正常              | <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 0107 / Tol. A |

## 作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

正常運転確認.

|          |                |                                                       |              |              |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 131 回 | 更新 (リセット) 実施: <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 | 消毒: 462 回    | 消毒+アル: 461 回 |
|          | リークチェック: 2 回   | 自己洗浄: 61 回                                            | アルコール単独: 1 回 | エア単独: 0 回    |

| 交換部品名称       | 交換・数量                       |
|--------------|-----------------------------|
| オゾン水濃度計      | <input type="checkbox"/> 1個 |
| 交換後 No.      |                             |
| オゾンセンサー      | <input type="checkbox"/> 1個 |
| 交換後 No.      |                             |
| 給水フィルター      | <input type="checkbox"/> 1本 |
| (中空糸・活性炭・糸巻) |                             |

| 交換部品名称        | 交換・数量                       |
|---------------|-----------------------------|
| オゾン分解触媒       | <input type="checkbox"/> 1個 |
| 接続コネクタ; 水槽側   | <input type="checkbox"/> 1個 |
| 接続コネクタ; チューブ側 | <input type="checkbox"/> 1個 |
| オゾン水濃度計用ケーブル  | <input type="checkbox"/> 1個 |
| 排水フィルター       | <input type="checkbox"/> 1個 |
| (従来型・新型)      |                             |

| 交換部品名称       | 交換・数量                         |
|--------------|-------------------------------|
| 排水栓          | <input type="checkbox"/> 1個   |
| エアフィルター      | <input type="checkbox"/> 1個   |
| 水フィルター       | <input type="checkbox"/> 1個   |
| 吸盤           | <input type="checkbox"/> 1個   |
| マニホールド周辺チューブ | <input type="checkbox"/> 1セット |
|              | <input type="checkbox"/>      |

## お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

和田