

# 修理報告書（引取り修理）

修理依頼  
番号

03-29492

No. 210215

|     |    |     |                    |      |             |
|-----|----|-----|--------------------|------|-------------|
| 配布先 | 客先 | 納入先 | 新鋭工業株式会社 大阪支店 殿    | 機種   | OED-1000    |
| 環営  | 環品 | 顧客名 | 間森診療所様             | 機番   | 100163      |
|     |    | 所在地 | 兵庫県神戸市中央区御幸通 8-1-6 | 納入日  | 2010年11月09日 |
|     |    | 点検者 | 中澤一裕               | 作業時間 |             |
|     |    | 受付日 | 2020年11月04日        |      |             |
| 計   | 3  | 返送先 | 納入先と同じ             | 出荷日  | 2020年12月04日 |

## 修理依頼・不具合内容

10/29 排水異常(E:402)

予備洗浄の排水が規定時間（60秒以内）を超えると発生します。

## 不具合原因（故障箇所）と処置

### [1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

排水系統を分解したところ、排水ポンプが故障しておりました。  
この部品と電気部品（基板）交換して復旧いたしました。  
定期保守点検もあわせて実施いたしました。

写真1：定期交換部品、

写真2：排気ポンプ、基板、ホース、水槽フィルタ



### [2] 修理・点検内容

- 1：部品交換・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 $0.7 \pm 0.2$ ppm）：0.71 ppm・・・正常
- 3：出荷時の装置情報
  - 殺菌：8、殺菌＋アルコール：257、リークチェック：0
  - 自己洗浄：6、アルコール単独：0、エア単独：0

承認

松  
21.02.15  
永

責任技術者

中  
21.02.15  
澤

作成

R03.2.15

中澤

## 交換部品

| 部品番号 | 部品名称                                 | 数量 | 備考                          |
|------|--------------------------------------|----|-----------------------------|
| 1    | 定期交換部品<br>オゾン水濃度計、オゾンセンサ、フィルタ、触媒、排水栓 | 1式 | 濃度計 No. 51809058<br>バルブ：469 |
| 2    | 排水ポンプ、排水ホース、水槽フィルタ                   | 1式 |                             |
| 3    | コントロール基板、タッチパネル                      | 1式 |                             |

（株）IHIアグリテック（旧社名 IHIハワラ）

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 [TEL:086-944-6528](tel:086-944-6528)

Ver3.1