

保守点検・修理 報告書

管理 No. 03-29218
発行日: 2020 年 9 月 1 日

販売名 / サビ・スミ・コブ Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号 300306
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1	作業年月日 2020 年 9 月 1 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間 Hr
顧客名	伊丹せいふう病院 様	TEL: 072-778-0500
所在地	兵庫県伊丹市鑄物師5丁目79番	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2020 年 8 月 27 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

タッチパネル（白黒型）が操作できない

不具合原因、作業内容

タッチパネルが故障しており、コントロール基板と合せて交換しました。

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 573
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0209 / T05C

作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 10	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 897/	殺菌/消毒+7h: 990 /
	リークチェック: 955	自己洗浄: 702	7hコ-ル単独: 3	エア単独: 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☐		オゾン分解触媒	☐	吸盤	☐
交換後 No.			排水栓	☒	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ; 水槽側	☐	水フィルター	☐
	☐		接続コネクタ; チューブ側	☐	タッチパネル	☒ 1
			オゾン水濃度計用フィルタ	☐	コントロール基板	☒ 1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

工場修理につき不要です

ご署名

印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シパウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者 作業者



官宗