

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20210726

発行日： 2021 年 7 月 26 日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> Ver. 3.1	製造番号 300371
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 3.1	作業年月日 2021 年 7 月 20 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input type="checkbox"/> Ver. 1.0	作業時間 Hr
顧客名	KKCウェルネス栗東健診クリニック 様	TEL : 077-551-0500
所在地	滋賀県栗東市小野501-1	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2014 年 9 月 24 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>	
	引取 修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input checked="" type="checkbox"/>	

不具合状況、依頼内容	
レベルセンサー異常 (E:214) ・ ・ 新鋭工業殿が現地で再現を確認した。	
過去に水漏れがあった	
不具合原因、作業内容	
水槽の水を検知する水位センサー「LVH」の検知信号が不安定な状態でした。	
この部品とセンサの信号を受ける「コントロール基板」を交換して復旧いたしました。	
また、水漏れは再現しませんでした。	
点検項目	
フタロック 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	水槽 LED 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
オゾンセンサ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/>	電源コード 正常 <input type="checkbox"/>
トレー 正常 <input type="checkbox"/>	殺菌/消毒 チューブ類 正常 <input type="checkbox"/>
水槽側コネクタ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	マニホールド周辺チューブ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	運転プログラムバージョン 正常 <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 0209 /T05C
作業結果：完了、連絡事項	
他所の事例ですが、水漏れは内視鏡に接続するチューブが外れると起き易いことがあります。	
接続に注意いただき、引き続き様子を見てくださいますようお願いいたします。	

装置 情報	交換後運転回数： 933	更新 (リセット) ・ ・ 未実施	殺菌/消毒： 4088	殺菌/消毒+7L： 2034
	リークチェック： 4	自己洗浄： 740	アルコール単独： 18	エア単独： 1

交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	<input type="checkbox"/>	
交換後 No.		
水位レベルセンサー	<input checked="" type="checkbox"/>	1
コントロール基板	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Ver0209 LED:3.3V		

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	<input type="checkbox"/>
排水栓	<input type="checkbox"/>
接続コネクタ：水槽側	<input type="checkbox"/>
接続コネクタ：チューブ側	<input type="checkbox"/>
オゾン水濃度計用フィルタ	<input type="checkbox"/>

交換部品名称	交換・数量
吸盤	<input type="checkbox"/>
エアフィルター	<input type="checkbox"/>
水フィルター	<input type="checkbox"/>
アルコール電磁弁	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

機械受付日：2021年7月7日	責任技術者	作業者
機械出荷日：2021年7月20日		中澤

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
 岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
 TEL:086-944-6528