

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020年9月2日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号: J000573
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日: 2020年9月2日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日: 15年7月2日
顧客名	神野病院 御中		ご担当: 院長先生 様
所在地	兵庫県姫路市飾磨区下野田2丁目5-33番地3		電話番号: 079-235-5501
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐	作業時間 / Hr	
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
定期保守点検			
不具合原因、作業内容			
保守部品交換			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 437
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☐	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☐	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2018.6/21 / 212回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0205 / T020
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
完了			

装置 情報	交換後運転回数: 45回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 55回	消毒+7L: 264回
	リークチェック: 112回	自己洗浄: 174回	アルコール単独: 2回	エア単独: 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個	オゾン分解触媒	☒ 1個	排水栓	☒ 1個
交換後 No. 15/21625		接続コネクタ: 水槽側	☐ 1個	エアフィルター	☐ 1個
オゾンセンサー	☒ 1個	接続コネクタ: チューブ側	☐ 1個	水フィルター	☐ 1個
交換後 No. 120515-021		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個	吸盤	☒ 1個
給水フィルター	☐ 1本	排水フィルター	☐ 1個	マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)			☐

お客様ご確認署名欄	2020年 9月 2日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	鎌屋 かつる 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	山田