

点検報告書（修理前）

修 理 依
頼 番 号

No. 210720

配 布 先	1	納 入 先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿		機 種	OED-1000S
客先	1	顧 客 名	池原クリニック 様		機 番	300337
環営	1	所 在 地	兵庫県神戸市灘区森後町2-1-6		納 入 日	2014年07月23日
環品	1	点 検 者	中澤一裕	作業時間	受 付 日	2021年03月26日
		返 送 先	納入先と同じ		出 荷 日	
計	3					

修理依頼・不具合内容

水槽下部より水漏れ
※現地で確認済み

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水槽下部に亀裂が発生し、そこから水が漏れていました。
ご使用回数、経年劣化、外力が複合的に作用して亀裂が生じたと推察いたします。
なお、前回修理した排水系統とは別の部分であることをご理解いただきたく
よろしくお願いいたします。

写真： 水漏れ部分



承 認

松
21.07.21
永

責任技術者

中
21.07.21
澤

作 成

R03. 7. 21
中澤

交 換 部 品

部品番号	部品名称	数量	備 考
1			
2			
3			

（株）I H I 物流産業システム

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 [TEL:086-944-6528](tel:086-944-6528)

Ver3.1

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20210726
発行日： 2021 年 7 月 26 日

販売名 / サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号 300337
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1	作業年月日 2021 年 7 月 20 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間 Hr
顧客名	池原クリニック 様	TEL： 078-811-4355
所在地	兵庫県神戸市灘区森後町2-1-6	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2014 年 7 月 23 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分 引取	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒	

不具合状況	
水槽下部より水漏れ	
作業内容	
水槽下部に亀裂が発生し、そこから水が漏れていました。	
この部分を溶接修理し、合わせて保守点検を実施しました。	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認 正常 ☒ ※水槽修理	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☐
トレー 正常 ☐	殺菌/消毒 チューブ類 正常 ☐
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0209 /T05C
作業結果：完了	

装置 情報	交換後運転回数： 1488 更新（リセット）・実施	殺菌/消毒： 200	殺菌/消毒+アル： 16795
	リークチェック： 1453 自己洗浄： 1501	アルコール単独： 2	エア単独： 2

交換部品名称 交換 数量	交換部品名称 交換・数量	交換部品名称 交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1	オゾン分解触媒 ☒ 1	マニホールドチューブ ☒ 1
交換後 No.51905191	排水栓 ☒ 1	☐
オゾンガスセンサー ☒ 1	接続コネクタ；水槽側 ☐	☐
交換後 No.171226-0	接続コネクタ；チューブ側 ☐	☐
	オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1	☐

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528	責任技術者 中澤 21.07.26	作業者 中澤
--	----------------------	--------