

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2021年 9月 15日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号	: 300770
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日	: 2021年 9月 15日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2016年 2月 23日
顧客名	中西医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	滋賀県彦根市芹橋2丁目9番14号		電話番号	: 0749-22-1152
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間	3 Hr
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・レベルセンサ異常 洗浄が開始されない。
・定期点検

不具合原因、作業内容

・コントロール基板交換、プログラム更新
・保守点検、マニホールド周辺チューブ交換
・アルコールキャップ(ブルー)交換

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 904
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数	2021, 9 / 15	
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0209 T05C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

試運転 正常に終了 につぎ完了

装置 情報	交換後運転回数：	123 回	更新（リセット） ☒ 実施・ ☐ 未実施	消毒：	85 回	消毒＋アル：	211 回
	リークチェック：	0 回	自己洗浄：	0 回	アルコール単独：	0 回	エア単独：

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個
交換後 No.	180 83251
オゾンセンサ	☒ 1個
交換後 No.	190218-004M1
給水フィルター	☐ 1本
(中空系・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1個
接続コネクタ: 水槽側	☐ 1個
接続コネクタ: チューブ側	☐ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個
排水フィルター	☐ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☒ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☒ 1個
マニホールド周辺チューブ	☒ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中川