

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20210511
発行日: 2021 年 5 月 11 日

販売名 / サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号 500453
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業年月日 2021 年 5 月 11 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	作業時間 Hr
顧客名	藤井内科クリニック 様	TEL: 079-224-1106
所在地	兵庫県姫路市増位本町1丁目7-14	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2019 年 12 月 16 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☒ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容

内視鏡に付着した白い粉の原因が機械側にあるか点検

不具合原因、作業内容

機械の外側に白い粉が付着していましたが、アイエスウォッシュが固まったものでした。
内視鏡への送水、送気、アルコール系統を中心に分解点検しましたが異常ありませんでした。

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ 入力数 1025
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0304 / T12A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

洗剤が残留すると異常停止しますので、機械と白い粉の因果関係はありませんでした。
機械の運転データを発信する PHS を取り付けさせていただきました。

装置 情報	交換後運転回数: 216	更新 (リセット) 実施・未実施 ☒	殺菌/消毒: 54 / 43	殺菌/消毒+7h: 959 / 956
	リークチェック: 46	自己洗浄: 1035	アルコール単独: 70	エア単独: 2

交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☐	
交換後 No.		
オゾンセンサー	☐	
	☐	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☐
排水栓	☐
接続コネクタ; 水槽側	☐
接続コネクタ; チューブ側	☐
オゾン水濃度計用フィルタ	☐

交換部品名称	交換・数量
吸盤	☐
エアフィルター	☐
水フィルター	☐
アルコール電磁弁	☒ 1
	☐

機械受付日: 2021年3月11日
機械出荷日: 2021年5月12日

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シバウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者 作業者



中澤



