

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

03-30615

No. 211005

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿			機種	OED-1000S
客先	顧客名	やまかわ消化器クリニック 様			機番	300665
環営	所在地	兵庫県神戸市垂水区日向2丁目1-4 2F			納入日	2015年11月02日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	2021年06月29日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	2021年09月10日
計	3					

修理依頼・不具合内容

水槽より水漏れ

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水槽下部に亀裂が発生し、そこから水が漏れていました。ご使用回数、経年劣化水圧、使用時の外力等が複合的に作用して亀裂が生じたと推察いたします。
水槽と電気部品、保守点検を実施して復旧いたしました。

写真1：水槽



写真2：定期交換部品

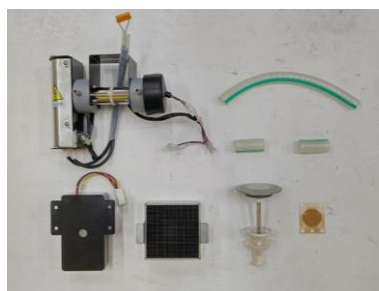


写真3：直流電源、基板、水槽パッキン



〔2〕修理・点検内容

- 部品交換（下表と写真をご参照ください）
- オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.68 ppm・・・正常
- 装置情報

交換後運転回数：1931→0 消毒：4782、消毒＋アルコール：5926、リークチェック：8451
自己洗浄：1561、アルコール単独：111、エア単独：3

交換部品

承認

松
21.10.05
永

責任技術者

中
21.10.05
澤

作成

R03.10.5
中澤

3：装置情報

交換後運転回数：1931→0
消毒：4782、消毒＋アルコール：5926、リークチェック：8451
自己洗浄：1561、アルコール単独：111、エア単独：3

交換部品

部品番号
部品名称
数量
備考

1
水槽
1 式

2
直流電源
1 枚

3
コントロール基板 0207→0209 型
1 枚
予防保全、調査のため

4
定期交換部品
濃度計、触媒、センサ、排水栓、フィルタ、チューブ
1 式
濃度計 No. 16112518
パルス：965