

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20210726
発行日： 2021 年 7 月 26 日

販売名 / サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.2	製造番号 300371
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.2	作業年月日 2021 年 7 月 20 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.1	作業時間 Hr
顧客名	KKCウェルネス栗東健診クリニック 様	TEL： 077-551-0500
所在地	滋賀県栗東市小野501-1	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2014 年 9 月 24 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分 引取	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容			
レベルセンサー異常 (E:214) ・ ・ 新鋭工業殿が現地で再現を確認した。			
過去に水漏れがあった			
不具合原因、作業内容			
水槽の水を検知する水位センサー「L V H」の検知信号が不安定な状態でした。			
この部品とセンサの信号を受ける「コントロール基板」を交換して復旧いたしました。			
また、水漏れは再現しませんでした。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐
トレイ	正常 ☐	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☐
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0209 /T05C
作業結果：完了、連絡事項			
他所の事例ですが、水漏れは内視鏡に接続するチューブが外れると起き易いことがあります。			
接続に注意いただき、引き続き様子を見てくださいますようお願いいたします。			

装置 情報	交換後運転回数： 933	更新 (リセット) ・ ・ 未実施	殺菌/消毒： 4 0 8 8	殺菌/消毒+アル： 2 0 3 4
	リークチェック： 4	自己洗浄： 7 4 0	アルコール単独： 1 8	エア単独： 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☐		オゾン分解触媒	☐	吸盤	☐
交換後 No.			排水栓	☐	エアフィルター	☐
水位レベルセンサー	☒	1	接続コネクタ；水槽側	☐	水フィルター	☐
コントロール基板	☒	1	接続コネクタ；チューブ側	☐	アルコール電磁弁	☐
Ver0209 LED:3.3V			オゾン水濃度計用フィルタ	☐		☐

機械受付日：2021年7月7日
機械出荷日：2021年7月20日

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地 1 7 0 - 6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者
中 21.07.26 澤	中澤