

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2021年 10月 29日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 301149
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日 : 2021年 10月 29日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2017年 6月 2日
顧客名	草場消化器クリニック 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	京都府京都市中京区西ノ京下合町11島津プラザビル4階		電話番号 : 075-822-0013
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 作業時間 / Hr		
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5回目 定期点検シート記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検 (1500回アラーム / 前回 2021.3.26)

不具合原因、作業内容

保守部品 給水F 交換

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 564
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 266 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレー	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日 / 交換回数	2020/1/14 / 7816回	
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0207 / T03C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置	交換後運転回数: 1682 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 10405 回	消毒+7L: 2465 回
情報	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 1039 回	アルコール単独: 84 回	エア単独: 1 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個	オゾン分解触媒	☒ 1個	排水栓	☒ 1個
交換後 No. 1309 1537		接続コネクタ: 水槽側	☒ 1個	エアフィルター	☐ 1個
オゾンセンサー	☒ 1個	接続コネクタ: チューブ側	☒ 1個	水フィルター	☐ 1個
交換後 No. 170821-006		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個	吸盤	☒ 1個
給水フィルター	☒ 1本	排水フィルター	☐ 1個	マニホールド 周辺チューブ	☒ 1セット
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)			☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 10 月 29 日

ご署名 田口 はるみ

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中川