

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2021年 11月 11日

|                               |                                                          |                               |                               |                 |                                     |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 販売名<br>サービスマニュアル<br>Ver (版番号) | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/>             | Ver. 3.1                      | 製造番号                          | : 300146        |                                     |
|                               | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/> | Ver. 3.1                      | 作業年月日                         | : 2021年 11月 11日 |                                     |
|                               | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input type="checkbox"/>     | Ver. 1.0                      | 納入年月日                         | : 2013年 11月 22日 |                                     |
| 顧客名                           | 矢野医院 御中                                                  |                               |                               | ご担当             | : 院長先生 様                            |
| 所在地                           | 和歌山県紀の川市桃山町調月769-100                                     |                               |                               | 電話番号            | : 0736-66-2609                      |
| 作業区分                          | 有償 <input checked="" type="checkbox"/>                   | 無償 <input type="checkbox"/>   | 保証期間 <input type="checkbox"/> | 作業時間            | 1.5 Hr                              |
|                               | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/>                 | 総合点検 <input type="checkbox"/> | 7回目                           | 定期点検シール記入       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取                         | 修理 <input type="checkbox"/>                              | 点検のみ <input type="checkbox"/> | その他 <input type="checkbox"/>  | 修理表示貼付          | <input type="checkbox"/>            |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

オーバーフロー異常 E: 205 (1/8)  
フタ開放異常 E: 203 (8/19)

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |                                        |              |                                                          |
|----------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 626          |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm       |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 前回交換日/交換回数   | 2018/11/21 / 156回                                        |
| 殺菌槽 LED  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 運転プログラムバージョン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 0207 / To2BV |

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

交換後運転回数 カウント不良 } 消毒に問題無し。  
メニ後月数不良 (275 etc)

GIF-XP170N

|    |               |                     |              |             |
|----|---------------|---------------------|--------------|-------------|
| 装置 | 交換後運転回数: 12 回 | 更新 (リセット) (実施) ・未実施 | 消毒: 132 回    | 消毒+アル: 40 回 |
| 情報 | リークチェック: 0 回  | 自己洗浄: 2 回           | アルコール単独: 0 回 | エア単独: 1 回   |

| 交換部品名称             | 交換・数量                                  |
|--------------------|----------------------------------------|
| オゾン水濃度計            | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| 交換後 No. 18083262   |                                        |
| オゾンセンサー            | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| 交換後 No. 200310-005 |                                        |
| 給水フィルター            | <input type="checkbox"/> 1本            |
| (中空糸・活性炭・糸巻)       |                                        |

| 交換部品名称        | 交換・数量                                  |
|---------------|----------------------------------------|
| オゾン分解触媒       | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| 接続コネクタ; 水槽側   | <input type="checkbox"/> 1個            |
| 接続コネクタ; チューブ側 | <input type="checkbox"/> 1個            |
| オゾン水濃度計用フィルタ  | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| 排水フィルター       | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| (従来型・(新型))    |                                        |

| 交換部品名称       | 交換・数量                                  |
|--------------|----------------------------------------|
| 排水栓          | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| エアフィルター      | <input type="checkbox"/> 1個            |
| 水フィルター       | <input type="checkbox"/> 1個            |
| 吸盤           | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| マニホールド周辺チューブ | <input type="checkbox"/> 1セット          |
|              | <input type="checkbox"/>               |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

〒649-6112 和歌山県紀の川市桃山町調月769-100  
矢野医院  
矢野 正 和  
TEL 0736-66-2609

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

奥田