

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2021年 12月 2日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号	: 500444
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	Ver. 3.1	作業年月日	: 2021年 12月 2日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒	Ver. 1.0	納入年月日	: 2019年 12月 10日
顧客名	竹尾クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府枚方市岡東町14-1		電話番号	: 072-844-1118
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 / Hr
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 1038
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	/
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0304/T12A
作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数： 108 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒： 6 回	消毒+アル： 182 回
	リークチェック： 187 回	自己洗浄： 1 回	アルコール単独： 0 回	エア単独： 0 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個	オゾン分解触媒	☒ 1個	排水栓	☒ 1個
交換後 No. 17082812		接続コネクタ：水槽側	☐ 1個	エアフィルター	☒ 1個
オゾンセンサー	☒ 1個	接続コネクタ：チューブ側	☒ 1個	水フィルター	☒ 1個
交換後 No. 170306-014		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個	吸盤	☒ 1個
給水フィルター	☐ 1本	排水フィルター	☐ 1個	マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)			☐

お客様ご確認署名欄	2021 年 12 月 2 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 竹尾 東理子	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL : 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	寶