

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：

2021年 12月 28日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 0ED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号	: 300045
	オゾン水内視鏡消毒機 0ED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日	: 2021年 12月 28日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 0ED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2013年 9月 1日
顧客名	橋村医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市浪速区大国2-6-11		電話番号	: 06-6641-6512
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 0.5 Hr
	保守点検 ☐	総合点検 ☐	8回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

本体電源を入れた状態で異音がする。

不具合原因、作業内容

オゾン分解触媒冷却ファン（シロッコファン）の経年劣化による異音が原因。

シロッコファン⇒交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 387
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☐ 有り, ファン交換
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日／交換回数	2020/9/17 / 3285回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0204 / To4c

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

ファン交換により異音が改善され、正常運転確認しました。

装置 情報	交換後運転回数： 113 回	更新（リセット）実施 ☒ 未実施	消毒： 1765 回	消毒＋アル： 1961 回
	リークチェック： 0 回	自己洗浄： 5 回	アルコール単独： 1 回	エア単独： 0 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☐ 1個
交換後 No.	
オゾンセンサー	☐ 1個
交換後 No.	
給水フィルター	☐ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☐ 1個
接続コネクタ：水槽側	☐ 1個
接続コネクタ：チューブ側	☐ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☐ 1個
排水フィルター	☐ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☐ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☐ 1個
マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL : 06-6228-3311

責任技術者

作業者

和田

寶