

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2022年 1月 6日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 3.1 Ver. 3.1 Ver. 1.0	製造番号 : 301335 作業年月日 : 2022年 1月 6日 納入年月日 : 2018年 1月 9日
顧客名	伊奈胃腸科 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	和歌山県和歌山市本町2丁目42番		電話番号 : 073-428-1717
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 作業時間 / Hr		
出張・引取	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 7回目 定期点検シール記入 ☒ 修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 580
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2021/7/1 / 10,210回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0207 / 704C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 ③（左側）

②（中）：1,437回 301336
①（右側）：1,059回 301334

装置	交換後運転回数：1723 回	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	消毒：10,864 回	消毒＋アル：1069 回
情報	リークチェック：2322 回	自己洗浄：1151 回	アルコール単独：199 回	エア単独：1046 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個	
交換後 No. 16092512	
オゾンセンサー ☒ 1個	
交換後 No. 190107-002	
給水フィルター ☐ 1本	
（中空糸・活性炭・糸巻）	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒 ☒ 1個	
接続コネクタ；水槽側 ☐ 1個	
接続コネクタ；チューブ側 ☐ 1個	
オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個	
排水フィルター ☐ 1個	
（従来型・新型）	

交換部品名称	交換・数量
排水栓 ☒ 1個	
エアフィルター ☐ 1個	
水フィルター ☐ 1個	
吸盤 ☒ 1個	
マニホールド周辺チューブ ☒ 1セット	
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日
和歌山県和歌山市本町2丁目42番地

ご署名 院長先生 伊奈胃腸科 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL : 06-6228-3311

責任技術者 作業者

奥田