

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2022年 1月 20日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 500628
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	Ver. 3.1	作業年月日 : 2022年 1月 20日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒	Ver. 1.0	納入年月日 : 2021年 1月 27日
顧客名	山本医院 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市東住吉区湯里2-5-11		電話番号 : 06-6704-2982
作業区分	有償 ☐ 無償 ☒	保証期間 ☐	作業時間 1.5 Hr
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐	1回目	定期点検シート記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

給水栓判 水漏れあり、本体後部もつたって背面パネル・ファン部分に錆びが生じている。

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 残圧 5.0mpa	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 876
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.75 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	/
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0304 / T12A

作業結果 (完了) 暫定処理など、連絡事項、特記事項

保守メンテナンス実施、正常運転確認

装置	交換後運転回数: 218 回	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒: 2 回	消毒+アル: 217 回
情報	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 2 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個	
交換後 No. 18013021	
オゾンセンサー ☒ 1個	
交換後 No. 140520-007	
給水フィルター ☐ 1本	
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒 ☒ 1個	
接続コネクタ; 水槽側 ☐ 1個	
接続コネクタ; チューブ側 ☐ 1個	
オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個	
排水フィルター ☐ 1個	
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓 ☒ 1個	
エアフィルター ☐ 1個	
水フィルター ☒ 1個	
吸盤 ☒ 1個	
マニホールド周辺チューブ ☐ 1セット	
☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2022 年 / 月 20 日

ご署名

福井 夕美

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	和田