

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2021年 5月 13日

販売名 ／ サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒	Ver. 3.1	製造番号 : 100222
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	Ver. 3.1	作業年月日 : 2021年 5月 13日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2011年 5月 12日
顧客名	大間知クリニック 御中 (IF)		ご担当 : 院長先生 様
所在地	大阪府東大阪市長堂2丁目15-10		電話番号 : 06-6618-1000
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 作業時間 1.0 Hr		
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 10回目	定期点検シート記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 470
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日／交換回数	2020/5/14 / 2758回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0107 / Tol.A

作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項
保守メンテナンス完了、正常運転確認。

装置情報	交換後運転回数: 140 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 976 回	消毒+7L: 1922 回
	リークチェック: 322 回	自己洗浄: 1534 回	アルコール単独: 656 回	エア単独: 42 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個	
交換後 No. 52002021	
オゾンセンサー ☒ 1個	
交換後 No. 141216-003	
給水フィルター ☐ 1本	
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒 ☒ 1個	
接続コネクタ: 水槽側 ☒ 1個	
接続コネクタ: チューブ側 ☒ 1個	
オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個	
排水フィルター ☐ 1個	
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓 ☒ 1個	
エアフィルター ☐ 1個	
水フィルター ☐ 1個	
吸盤 ☒ 1個	
マニホールド周辺チューブ ☐ 1セット	
☐	

お客様ご確認署名欄	3 年 5 月 13 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 山崎 由希	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中心区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	和田