

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2021年 5月 18日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 300910
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日 : 2021年 5月 18日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2016年 6月 23日
顧客名	AMA Clinic 岸ノ里院健診センター 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市西成区千本南1-3-2 タイホウスクエア2階		電話番号 : 06-4398-1127
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐	作業時間 3 Hr	
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2回目	定期点検シート記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守メンテナンス開始時にタンクパネルリリース、その後起動せず。

不具合原因、作業内容

マニホールド周辺チューブ・コントロール基板 交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 残 8MPa	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 603
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.90 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2019/5/22 / 34回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0269 / 7056

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

保守メンテナンス完了

装置 情報	交換後運転回数 : 40 回	更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	消毒 : 29 回	消毒+アル : 45 回
	リークチェック : 0 回	自己洗浄 : 34 回	アルコール単独 : 1 回	エア単独 : 0 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個	
交換後 No. 15062054	
オゾンセンサー ☒ 1個	
交換後 No. 140516-006	
給水フィルター ☐ 1本	
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒 ☒ 1個	
接続コネクタ: 水槽側 ☒ 1個	
接続コネクタ: チューブ側 ☒ 1個	
オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個	
排水フィルター ☐ 1個	
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓 ☒ 1個	
エアフィルター ☐ 1個	
水フィルター ☐ 1個	
吸盤 ☐ 1個	
マニホールド周辺チューブ ☒ 1セット	
コントロール基板 ☒ 1	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2021年 5月 18日

ご署名 榎南史朗 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL : 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	和田