

# 修理報告書 (引取り修理)

修理依頼番号	03-29355	No. 210125
--------	----------	------------

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿	機種	OED-1000S
客先	顧客名	池原クリニック 様	機番	300337
環営	所在地	兵庫県神戸市灘区森後町2-1-6	納入日	2014年07月23日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	
			受付日	2020年09月17日
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	2020年12月02日

## 修理依頼・不具合内容

排水異常 (E:402) 頻発

## 不具合原因 (故障箇所) と処置

### [1] 点検結果 (不具合箇所と不具合原因)

異常は再現しませんでした。排水ポンプの性能が劣化しておりました。  
このほかに、排水に関係する部品を交換して復旧いたしました。

写真: ドレンバルブASSY、排水ポンプ、コントロール基板



### [2] 修理・点検内容

- 部品交換・写真と下表をご参照ください
- オゾン水濃度測定 (規定値 $0.7 \pm 0.2$ ppm) : 0.71 ppm ・ 正常
- 出荷時の装置情報  
交換後運転回数 988 殺菌 : 177、殺菌+アルコール : 16318、リークチェック : 959  
自己洗浄 : 1460、アルコール単独 : 4、エア単独 : 0

承認	松永
責任技術者	中澤
作成	中澤
R03.1.25	

## 交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	ドレンバルブASSY	1	
2	コントロール基板	1	予防交換 0209 LED3.3V
3	排水ポンプ	1	

(株) IHIアグリテック (旧社名 IHIパワ)

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 [TEL:086-944-6528](tel:086-944-6528)

Ver3.1