

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-30153

No. 210419

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿	機種	OED-1000S
客先	顧客名	中谷病院様	機番	300913
環営	所在地	和歌山県和歌山市鳴神 123-1	納入日	2016年07月13日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	
	受付日		2021年03月04日	
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	2021年04月16日

修理依頼・不具合内容

水槽底部より水漏れ

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水槽下部に亀裂が発生し、そこから水が漏れていました。（写真2を参照ください）
ご使用回数、経年劣化、外力が複合的に作用して亀裂が生じたと推察いたします。
亀裂部分を溶接して復旧し、定期保守点検を実施いたしました。

写真1：定期交換部品

写真2：水槽亀裂部分



〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.70 ppm・・・正常
- 3：出荷時の装置情報

交換後運転回数 1287→0 殺菌：1386、殺菌＋アルコール：7283、リークチェック：7
自己洗浄：1516、アルコール単独：2、エア単独：3

承認
松永
責任技術者
中澤
作成
R03. 4. 19 中澤

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
1	定期交換部品 濃度計、センサ、触媒、排水栓、フィルタ	1式	濃度計：18113421 センサ：130529-022
2	コントロール基板	1	予防交換 0209 LED3. 3V
3	排水栓ポップアップ	1	異物による破損

（株）IHIアグリテック（旧社名 IHIパワテック）

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 [TEL:086-944-6528](tel:086-944-6528)

Ver3.1