

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2021年 6月 11日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 301154
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日 : 2021年 6月 11日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2017年 6月 22日
顧客名	渡辺病院 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市西成区天下茶屋1-15-1		電話番号 : 06 - 6661-6318
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 作業時間 1.5 Hr		
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 387
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒ 交換
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数	/	
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0207 / T03C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

保守メンテナンス完了、正常運転確認。購入から5年チューブ劣化具合含め毎年の点検がアルコールキャップ自交換望ましい。

装置 情報	交換後運転回数: 565 回	更新 (リセット) ☒ 実施・未実施	消毒: 156 回	消毒+アル: 410 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 2 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個		オゾン分解触媒 ☒ 1個		排水栓 ☒ 1個	
交換後 No. 13061477		接続コネクタ: 水槽側 ☐ 1個		エアフィルター ☐ 1個	
オゾンセンサー ☒ 1個		接続コネクタ: チューブ側 ☐ 1個		水フィルター ☐ 1個	
交換後 No. 140505-003		オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個		吸盤 ☒ 1個	
給水フィルター ☐ 1本		排水フィルター ☐ 1個		マニホールド周辺チューブ ☒ 1セット	
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 6 月 11 日

ご署名

山田 竜嗣

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

和田