

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2021年 6月 11日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒	Ver. 3.1	製造番号	: 100791
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	Ver. 3.1	作業年月日	: 2021年 6月 11日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2013年 7月 3日
顧客名	たいしょう生協診療所 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市大正区千島1-20-12		電話番号	: 06-6554-1197
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 1.5 Hr
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	8回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 575
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒ 昨年水漏し箇所問題ナシ	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒ 交換
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数	2018/7/2 / 499回	
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0107 / Tol.A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

保守メンテナンス完了、正常運転確認。タッチパネル寿命、次回交換の案内。

装置 情報	交換後運転回数: 146 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 472 回	消毒+7L: 466 回
	リークチェック: 2 回	自己洗浄: 64 回	アルコール単独: 2 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個		オゾン分解触媒 ☒ 1個		排水栓 ☒ 1個	
交換後 No. 52105010		接続コネクタ; 水槽側 ☒ 1個		エアフィルター ☐ 1個	
オゾンセンサー ☒ 1個		接続コネクタ; チューブ側 ☒ 1個		水フィルター ☐ 1個	
交換後 No. 170130-002		オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個		吸盤 ☒ 1個	
給水フィルター ☐ 1本		排水フィルター ☐ 1個		マニホールド 周辺チューブ ☒ 1セット	
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)			

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 6 月 11 日

ご署名

瀧本 真理

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

和田