

保守点検・修理 報告書

管理 No.

20200515

発行日： 2020

年 5 月 15 日

販売名 /サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号 300191
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1	作業年月日 2020 年 5 月 15 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間 Hr
顧客名	小野病院 様	TEL: 0794-62-9900
所在地	兵庫県小野市天神町973	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2014 年 3 月 10 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☒	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

3月の点検後 動作音が大きくなった
また 水漏れがある

不具合原因、作業内容

動作音... 3月の点検で外したネジは緩んでいた。
念のため エアボンプ、排水ボンプに共振対策をしました。
水漏れ... トレアシヤのパッキンが劣化してそこから水が漏れていた

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 483
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☐ ヒビ	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☐
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0204 / T04C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 49	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 540 /	殺菌/消毒+7L: 1150 /
	リークチェック: 561	自己洗浄: 657	アルコール単独: 0	エア単独: 4

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☐		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No.			排水栓	☐	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☐		接続コネクタ: 水槽側	☐	水フィルター	☐
	☐		接続コネクタ: チューブ側	☐	トレアシヤパッキン	☒ 1
			オゾン水濃度計用フィルタ	☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

清水 邦子

印

修理業者

株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シパウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者

作業者

中
20.5.15
澤

中澤