

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 3 年 3 月 30 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：3000/0
作業年月日	平成 3 年 3 月 30 日		作業時間：1.5 Hr
顧客名	多可赤十字病院 様		TEL：
所在地	兵庫県多可郡多可町中区岸上280		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	平成 2013 年 3 月 18 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 8 年 8 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

排水注意

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 580
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数：611	更新（リセット）（実施）・未実施	殺菌/消毒：1304	殺菌/消毒+7L：3141
	リークチェック：2464	自己洗浄：1138	アルコール単独：1	エア単独：3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		吸盤		☒	
排水栓		☒		接続コネクタ；水槽側		☒	
オゾン水濃度計		☒		接続コネクタ；チューブ側		☒	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒		新型排水パイプ-2本		☒	2
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 3 月 30 日

ご署名 小比類巻 雅弘

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL：06-6228-3311

責任技術者	作業者
中 21.3.30 澤	梅田 雅弘 77-77-7 三好