

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20200817
発行日: 2020 年 8 月 17 日

販売名 / サービスマシナ Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号 300927
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1	作業年月日 2020 年 8 月 6 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間 2 Hr
顧客名	新大阪病院 様	TEL: 06-6758-7007
所在地	大阪市生野区田島1丁目16番6号	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☒ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

依頼内容	
中古医療機器販売に伴う点検・整備	
作業内容	
定期交換部品の交換および総合点検	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バッテリ数 682
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0209 / TOSC
作業結果 (完了) 暫定処理など、連絡事項、特記事項	

装置情報	交換後運転回数: 126 → 0 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: IS /	殺菌/消毒+7L: 405 /
	リークチェック: 4 自己洗浄: 1	7Lコル単独: 0	エア単独: 4

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No. 13091517			排水栓	☒ 1	トイASSY	☒ 1
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ; 水槽側	☒ 2	電源コード	☒ 1
交換後 No. 180220-003			接続コネクタ; チューブ側	☒ 2	コントロール基板	☒ 1
☐			オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シパウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者 作業者



宮宗