

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2020 年 10 月 16 日

販売名 / サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機	OED-1000	☐	Ver. 3. 1	製造番号	300742
	オゾン水内視鏡消毒機	OED-1000S	☒	Ver. 3. 1	作業年月日	2020 年 10 月 16 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機	OED-1000S Plus	☐	Ver. 1. 0	作業時間	Hr
顧客名	うえだ糖尿病・消化器内科 様				TEL :	072-990-2705
所在地	大阪府八尾市春日町1-8-29 龍華クリニックビル3				ご担当	様
販売店					ご担当	様
納入年月日	2020 年 11 月 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☒	年 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

中古医療機器販売に伴う点検整備

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 720
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0209 / T05C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数： 0	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：2198/	殺菌/消毒+7L：2199/
	リークチェック： 2101	自己洗浄： 787	アルコール単独： 75	エア単独： 2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No. 14021685			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ；水槽側	☒ 2	水フィルター	☐
	☐		接続コネクタ；チューブ側	☒ 2		☐
			オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

工場修理につき不要です

ご署名

印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シパウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者 作業者



宮本