

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2021年 6月 11日

販売名 サビ・スマニアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒	Ver. 3.1	製造番号	: 100765
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	Ver. 3.1	作業年月日	: 2021年 6月 14日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2013年 6月 17日
顧客名	楽只診療所 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	京都府京都市北区紫野上御奥町23-1		電話番号	: 075-491-0232
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間	☐
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	作業時間	1.5 Hr
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	回目	定期点検シール記入 ☒
		その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・メニュー画面から切替わらない、突然再起動する。

不具合原因、作業内容

- ・コントロール基板(新型) 交換 (過去3年で既に2回交換している)
- ・保守点検、マニホールド周辺部品交換
- ・プログラム更新 (T05c)

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 484
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒ 2021年6月15日交換
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数	2017/6/28 / 504回	
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0209 / T05c

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

・コントロール基板 交換後 試運転を行い、正常終了のため 解決とする。

装置	交換後運転回数: 179 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 9 回	消毒+アル: 867 回
情報	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 839 回	アルコール単独: 7 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個
交換後 No. 14061831	
オゾンセンサー	☒ 1個
交換後 No. 150223-013	
給水フィルター	☐ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1個
接続コネクタ: 水槽側	☒ 1個
接続コネクタ: チューブ側	☒ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個
排水フィルター	☐ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☒ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☒ 1個
マニホールド周辺チューブ	☒ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

3-6月16日
夜間専任

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中川